

راهنمای سریع کاربری AED شوکا


دستگاه را روشن کنید.

* استفاده از دستگاه صرفاً توسط افراد مسلط به دفترچه راهنما، فرآیند CPR و سایر آموزش‌های پزشکی اورژانسی مجاز است.



۱

از هوشیار نبودن، عدم تنفس صحیح و عدم وجود نبض بیمار مطمئن شوید.

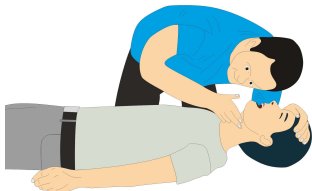

۲


با اورژانس تماس بگیرید.



۳

پدها را به صورت کامل به پوست خشک بیمار بچسبانید.

* در صورتی که وزن بیمار کمتر از ۲۵ کیلوگرم یا سن او ۱ تا ۸ سال است، از پدهای کودک استفاده کنید.

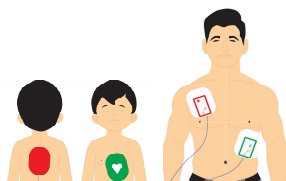

۴


در حین آنالیز سیگنال قلب، به بیمار دست نزنید.



۵


اگر شوک لازم است، کلید چشمک زن شوک را فشار دهید.

* در صورتی که دستگاه در حالت تمام خودکار باشد، شوک بدون نیاز به فشردن کلید پس از ۳ ثانیه اعمال می‌شود.

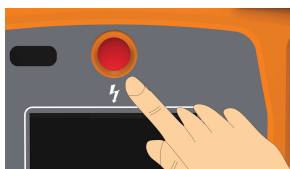

۶

در صورت عدم توصیه شوک یا پس از اعمال شوک، CPR را شروع کنید.

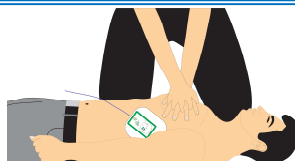

۷