



## راهنمای سریع کاربری (ECG) JAM H1

برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربری دستگاه مراجعه شود. دانلود از طریق اسکن QR Code روبرو:




راهنما سریع کاربری فقط برای کاربران حرفه‌ای و مسلط به کاربری و استفاده از دستگاه (و ملحقات و ضمائم)، کاربرد دارد.

### ۲- اتصال الکترودها و اجرای اپلیکیشن


بعد از آماده سازی پوست، الکترودها را به بدن بیمار متصل کنید.

کانکتور USB-Type C را به موبایل/تبلت متصل کنید. اپلیکیشن به صورت خودکار، اجرا خواهد شد.

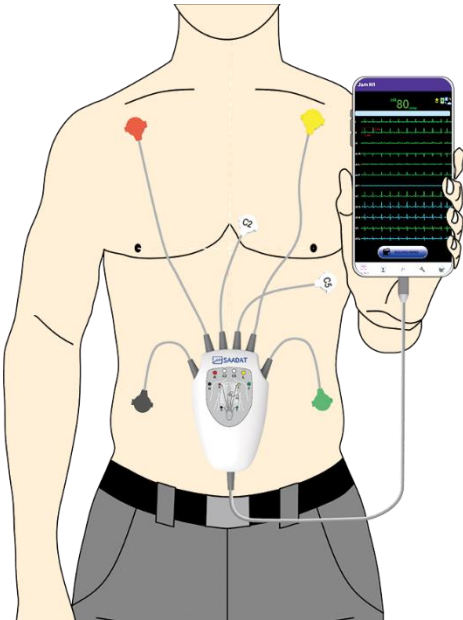

### ۱- دانلود و نصب اپلیکیشن

با مراجعه به کافه بازار و جستجوی "تحلیلگر سیگنال قلب جم‌اچ ۱" یا اسکن QR code زیر، اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید. (سازگار با سیستم عامل اندروید)

پس از نصب، با لمس کلید  و ورود به منوی User، اطلاعات بیمار را وارد کرده و تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید.



اسکن کنید

#### User

Device Code

my device

ID

1234

Name/Family

my name

Age

49

Sex

M


Physician Email

my.physician.email@gmail.com

### ۳- ثبت سیگنال و گزارش گیری

با لمس کلید RECORD AND SEND در پایین صفحه‌ی اصلی، رکوردگیری شروع و داده‌ها به صورت خودکار به سرور ارسال خواهد شد.

با لمس کلید  و ورود به منوی Records، گزارش تحلیلی قابل مشاهده خواهد بود.

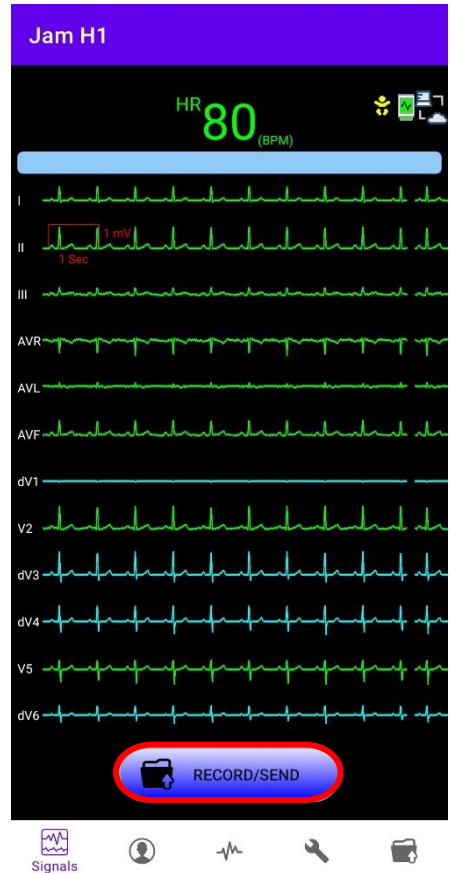

### ۴- آیکون‌های صفحه نمایش

نمایشگر ON بودن PACE



نمایشگر اتصال اپلیکیشن به ماژول و برقراری ارتباط (سفید شدن نمایشگر در صورت عدم اتصال)



نمایشگر اتصال به سرور در شرایط عدم وجود درخواست ارسال داده‌ها



نمایشگر اتصال به سرور در شرایط عدم دسترسی به اینترنت و وجود درخواست برای ارسال داده‌ها



نمایشگر اتصال به سرور در هنگام ارسال داده‌ها از طریق اینترنت



نمایشگر نوع بیمار (بزرگسال، کودک و نوزاد)



خدمات پس از فروش: +۹۸ ۲۱ ۷۳۰۹۸۰۰۰

فکس: +۹۸ ۲۱ ۷۷۹۶۰۷۶۱

D01176-V1

Email: info@saadatco.com