



راهنمای سریع کاربری فشارسنج bp4

۱. کاف را به درستی دور بازوی بیمار ببندید.

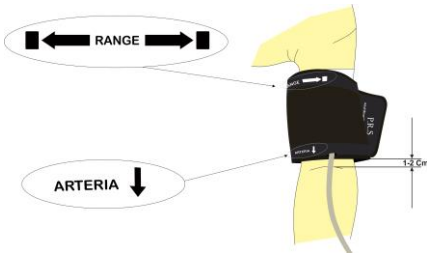


- کاف را روی بازوی بدون لباس یا روی لباس نازک بپیچید. فشار بیش از اندازه بر روی بازو به دلیل تا زدن آستین وجود نداشته باشد.
- علامت **ARTERIA** ↓ بر روی شریان بازویی قرار گیرد.
- انتهای کاف در **RANGE** قرار گیرد.
- لبه پایینی کاف بایستی از قسمت داخلی آرنج ۱ تا ۲ سانتی متر بالاتر باشد.
- بستن کاف باید تا اندازه‌ای محکم باشد که به سختی اجازه دهد دو انگشت زیر آن قرار گیرند.

۲. بیمار را در موقعیت مناسب قرار دهید.

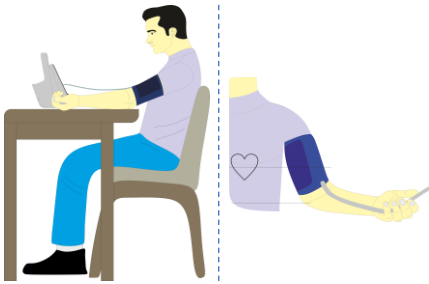

- توصیه می‌شود بیمار ۵ دقیقه قبل از اندازه‌گیری کاملا استراحت کند.
- دست بیمار به آرامی روی یک سطح سفت قرار گیرد.
- بازویی که کاف روی آن پیچیده شده است، در سطح قلب قرار گیرد.

۳. فشارسنجی را انجام دهید.

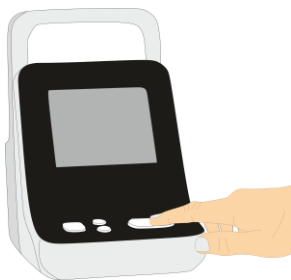

- برای روشن کردن دستگاه، کلید **START/STOP** را فشار دهید.
- کلید **START/STOP** را یک بار دیگر برای شروع اندازه‌گیری فشار دهید. کاف به طور خودکار باد می‌شود.
- بیمار در حین اندازه‌گیری نباید تکان بخورد یا صحبت کند.
- پس از اتمام فرآیند، دستگاه فشار سیستولیک، دیاستولیک و نرخ ضربان قلب را نمایش می‌دهد.
- برای خاموش کردن دستگاه، کلید **START/STOP** را ۳ ثانیه نگه دارید.
- در صورتی که از دستگاه به مدت ۳ دقیقه استفاده نشود، به صورت خودکار خاموش می‌گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کاربری bp4 مراجعه کنید.

